

NasuClear™ neusdouche

Hoe voorkomt u dat nasaal spoelzout eventueel uw mond inloopt?

Via de neus kan het nasaal spoelzout uw mond bereiken. Dat is niet schadelijk, alleen niet zo smakelijk. Om dit te voorkomen, kunt een klein beetje voorover hangen boven de wastafel. Ook kunt u uw keel min of meer blokkeren door een gorgelend geluid te maken.

LET WEL: het vergt misschien in het begin een beetje oefening, maar het is het waard.

Wel geluid van compressor, maar geen straal

Dit kan gebeuren doordat de NasuClear™ neusdouche teveel lucht heeft aangezogen. Mocht dit gebeuren, vult u dan het reservoir met water, verwijder de neus-tip en houdt uw vinger op de opening die bestemd is voor de neus-tip. Zet het apparaat aan. Na 5-10 sec. zal het water weer gaan stromen (het loopt dan uit de opening). Zet het apparaat weer uit en plaats de neus-tip weer terug.

Reinigen van de houder en oplader

Uitsluitend de buitenkant van de houder en oplader reinigen met een (vochtig) doekje. Beide onderdelen nooit reinigen onder stromend water of onderdompelen in water.

Reinigen van de neus-tip en reservoir

Neem de neus-tip uit de NasuClear™ neus-douche en reinig de neusstip met warm water en een beetje (niet schurend) afwasmiddel. U kunt de neus-tip ook desinfecteren door deze - nat - gedurende 20 seconden in de magnetron te verwarmen. Spoel het reservoir om met gewoon water.

Buiten bereik van kinderen bewaren

De NasuClear™ neusdouche is geen speelgoed en dient daarom buiten het bereik van kinderen te worden bewaard. Kinderen en niet-zelfredzame personen dienen de NasuClear™ neusdouche onder toezicht te gebruiken.

NasuClear™ neusdouche

Regelmatig ontkalken.

Voor het verlengen van de levensduur dient u de NasuClear™ neusdouche regelmatig te ontkalken (bij dagelijks gebruik: één keer per maand). Ontkalken kan o.a. met natuurazijn. U giet een scheutje natuurazijn in het reservoir en vult dit aan met water. Zet de NasuClear™ aan en spuit het reservoir helemaal leeg. Om te voorkomen dat alles nat wordt, kunt u dit buiten doen of houdt u uw hand boven de neus-tip. Daarna het reservoir en neus-tip naspoelen met schoon water.

Garantie

Bij normaal gebruik heeft u na aankoop op de NasuClear™ neusdouche 12 maanden garantie.

Technische eigenschappen

Maximale capaciteit reservoir 160 ml. De NasuClear™ neusdouche is gemaakt van hoogwaardige materialen en heeft een stringente kwaliteitscontrole ondergaan voordat het product aan u is afgeleverd. Mocht u desondanks gebreken constateren, neemt u dan contact op via e-mail: info@kno-winkel.nl of bel :+31 (0)85 773 20 80

Fabrikant

Risun Technology - China 

Distributeur

dosmedical[®]
dedicated to healthcare

kno-winkel.nl en nko-winkel.be zijn onderdeel van
Dos Medical BV - Weiland 1a - 6666 MH - Heteren (NL)
dosmedical.nl • kno-winkel.nl • nko-winkel.be
e-mail: info@kno-winkel.nl

Laatste datum van herziening: 2017-05

Handleiding NasuClear™ neusdouche



kno-winkel.nl
keel • neus • oor
nko-winkel.be


NasuClear™ neusdouche

NasuClear™ elektrische neusdouche

Gefeliciteerd met uw aankoop. U heeft een kwaliteitsproduct gekocht voor het reinigen van uw neus en neusbijholten met behulp van nasaal spoelzout. Leest u eerst deze gebruiksaanwijzing door. Zo heeft u maximaal profijt van uw aankoop.

De NasuClear™ neusdouche

Door nasaal spoelzout met behulp van een normale, zachte of pulserende waterstraal via de neus toe te dienen, reinigt u met de NasuClear™ neusdouche uw neus en neusbijholten.

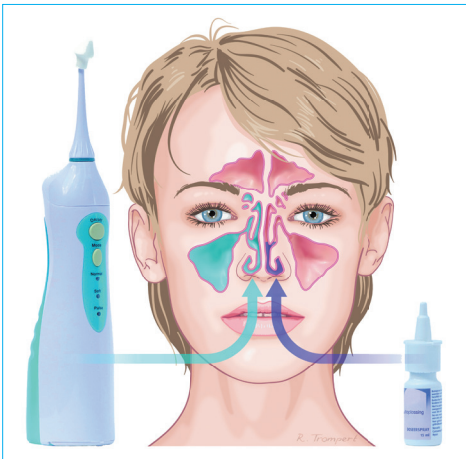

De NasuClear™ neusdouche helpt o.a. bij

- neusbijholtenontsteking
- hooikoorts en allergie voor huisstofmijt en dierlijke huidschilfers
- (neus)verkoudheid
- herstel van het neusslijmvlies na een neusoperatie

BELANGRIJK! Voordat u de NasuClear™ neusdouche de eerste keer gebruikt (of als u de NasuClear™ langer dan drie maanden niet heeft gebruikt) dient u eerst de oplaadbare batterij in de NasuClear™ neusdouche volledig op te laden.

NasuClear™ neusdouche

Zet na ieder gebruik de NasuClear™ neusdouche op de oplader en sluit deze aan op het lichtnet. Op deze manier gaat de oplaadbare batterij het langst mee.

Tijdens het opladen knippert de 'PULSE/ CH'-indicator. Als deze indicator continu brandt, is de batterij volledig opgeladen en is de NasuClear™ neusdouche gereed voor gebruik.



Nasaal spoelzout

U kunt kiezen voor Dos Medical Nasaal Spoelzout™. Dit is samen met keel-neus-oor artsen speciaal ontwikkeld voor het reinigen van neus en neusbijholten. U kunt Dos Medical Nasaal Spoelzout™ verkrijgen via uw apotheek of bestellen via: kno-winkel.nl of nko-winkel.be

Voordat u uw neus(bijholten) gaat reinigen

LET OP! U moet uw neus en neusbijholten altijd reinigen met nasaal spoelzout. Reinigen met gewoon water is pijnlijk en kan irriteren. Bovendien reinigt alleen water niet zo goed als spoelen met nasaal spoelzout.

Gebruik altijd een schone neus-tip. Uit hygiënische overwegingen dienen niet meerdere personen dezelfde neus-tip te gebruiken. U drukt de neus-tip voorzichtig in de houder. U kunt de neus-tip 360° draaien. Om de neus-tip weer uit de houder te halen, drukt u op de witte knop en trekt u met een draibeweging deze er voorzichtig uit.

TIP Als u Dos Medical nasaal spoelzout™ (met of zonder xylitol) gebruikt, is het 't meest economisch om tegelijkertijd twee sachets op te lossen in 500ml. U heeft dan een isotonische oplossing gemaakt die precies de goede concentratie bevat voor het spoelen van uw neus.

NasuClear™ neusdouche

Met deze 500ml oplossing kunt u 3x het reservoir van de NasuClear™ volledig vullen, goed voor 3 neusspoelingen. Bewaar deze oplossing bij voorkeur in een afsluitbare maatbeker in de koelkast en nooit langer dan twee dagen.

TIP Reinig uw neus en neusbijholten met een lauwwarme oplossing (circa 37°C) van nasaal spoelzout. Dit voelt comfortabeler aan dan spoelen met koude oplossing. Al u een nasaal spoelzoutoplossing bewaart in de koelkast is het aan te raden deze even op te warmen bv. in de magnetron.

U vult het reservoir van de NasuClear met een oplossing van nasaal spoelzout via het klepje onderaan het reservoir of door het reservoir naar beneden van de houder af te schuiven.



Het neusspoelen

U houdt de NasuClear rechtop (verticale stand).

Via de 'MODE' knop kiest u de straal die u het prettigst vindt:

- Normal (normaal)
- Soft (zacht)
- Pulse (pulserend)

Start en stop de reiniging door op ON/ OFF te drukken.

Spoel uw neus door het nasaal spoelzoutoplossing gelijkmatig over beide neusgaten verdelen.

Nadat u het reservoir heeft gevuld, plaatst u de neus-tip in één van uw neusgaten en buigt u een beetje voorover boven gootsteen of wastafel. Om de NasuClear te starten drukt u op on/ off knop

Tijdens het gebruik van de NasuClear™ neusdouche vloeit nasaal spoelzout en slijm uit uw neus terug. Dat is precies de bedoeling. Zo verwijdert u slijm, maar ook micro-organismen en allergenen (=stoffen waar iemand allergisch voor is) uit uw neus(bijholten).

TIP Houdt u een handdoek/ tissue bij de hand om tijdens en na het neusspoelen uw neus aan af te kunnen afvegen.