




Range operativo 7-67 cm H2O
Operative range 7-67 cm H2O

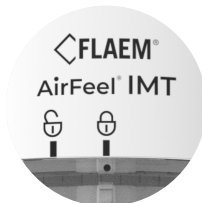

Tappo apribile per una perfetta pulizia
Openable cap for optimal cleaning

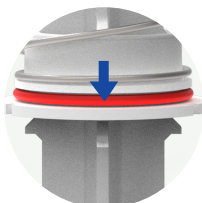

Facile lettura del valore impostato
Easy reading of the set value

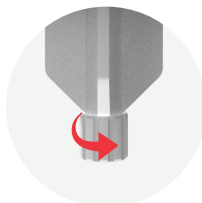

Facile impostazione della pressione
Easy pressure setting

AirFeel IMT

Inspiratory Muscle Trainer



La terapia dell'apparato respiratorio
The respiratory therapy


MADE IN ITALY


www.flaem.it

Indicato per / Recommended for:

- aumentare la capacità polmonare / *increase pulmonary capacity*
- aumentare lo spessore del diaframma / *increase thickness of the diaphragm*
- migliorare la forza dei muscoli della base pelvica / *Improve pelvis base muscle's strength*


Applicazione clinica, occupazionale, ambientale e sportiva dell'IMT, nonché breve panoramica degli adattamenti fisiologici indotti dall'IMT / *Clinical, occupational, environmental, and sport application of IMT as well as a brief overview of physiological adaptations induced by IMT.*

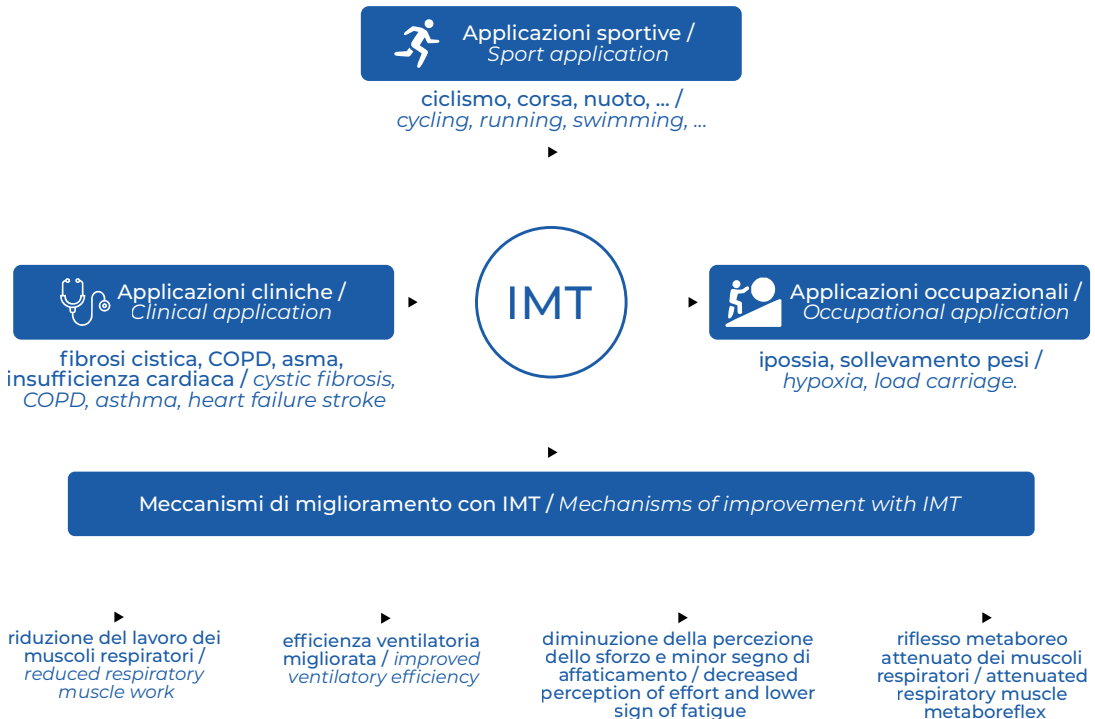

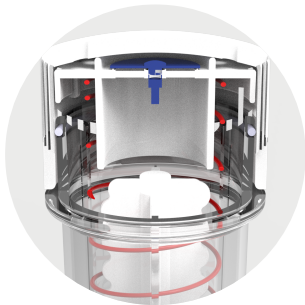

In posizione di riposo la molla spinge il cappuccio della valvola evitando il passaggio dell'aria

When in resting position the spring pushes the valve cap avoiding the air passage

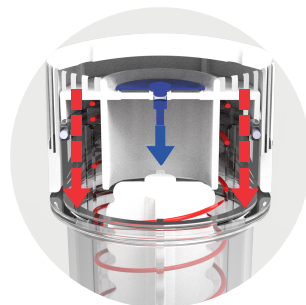

Quando il paziente respira la pressione applicata alla valvola (freccia blu) fa scivolare il cappuccio verso il basso e lascia passare l'aria (freccia rossa). La pressione può essere regolata ruotando l'albero centrale e comprimendo/rilasciando la molla

When patient breaths the pressure applied to the valve (blue arrow) makes the cap to slide down and let the air (red arrow) to pass through. The pressure can be set by rotating the central shaft and compressing/releasing the spring

Il dispositivo è realizzato in materiali di grado medicale: polipropilene, silicone ed acciaio inossidabile sono adatti alla pulizia, disinfezione chimica e termica, oltre che ad essere autoclavabili.

The device is made of medical grade materials: polipropilene, silicone and stainless steel are suitable for cleaning, chemical and thermal disinfection, as well as being autoclavable.

Viene fornito a completamento della dotazione un pratico tappanaso, utile per massimizzare gli esercizi respiratori.

A practical nose clip is supplied to complete the equipment, useful for maximising breathing exercises.


Contenuto confezione / Package contents


IMT / IMT

Boccaglio / Mouthpiece

Tappanaso / Nose cap

Manuale istruzioni / Instruction manual

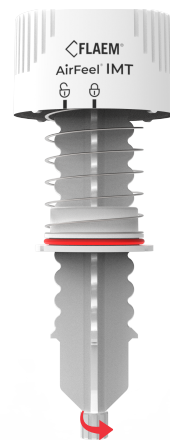

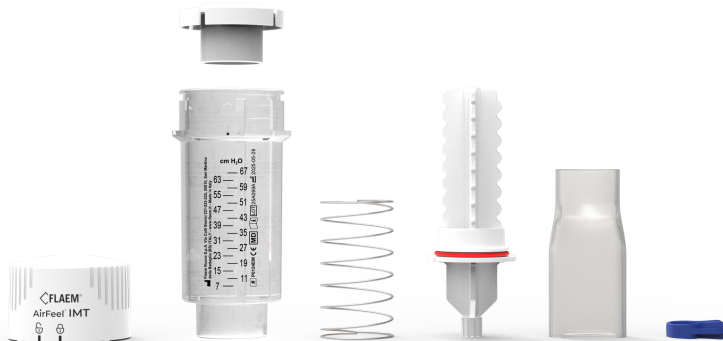

Model: P0124EM

Dimensioni / Dimensions: Ø42 x 110 mm
Peso / Weight: 55 g
Materiali / Materials: PP, SUS, Silicone
Imballo / Multiple packaging: 24 pz

AC0798P



Conformità
Compliance

Conforme al regolamento 2017/745 UE
"Dispositivi Medici" e successive modifiche /
In compliance with EU regulation 2017/745
Medical Device and subsequent amendments



Esente da ftalati. In conformità a Reg. (CE)
n.1907/2006 / Phthalates free. In conformity
with Reg. (EC) no.1907/2006



HERLI Medical

Leading in Medical Excellence

henrotech

part of Herli Medical

HERLI MEDICAL +32 2 588 5667
 PRINS BOUDEWIJNLAAN 7 INFO@HERLIMEDICAL.COM
 UNIT A05, B-2550 KONTICH WWW.HERLIMEDICAL.COM