

VOOR EEN DOELTREFFENDE OPPERVLAKKENDESINFECTIE

Incidin® OxyFoam & OxyWipe


Gebruiksklare reiniger en desinfectans met Hi-speed H₂O₂™

De innovatieve formule van Incidin OxyFoam & Incidin OxyWipe is op basis van waterstofperoxide-oplossing met een breed werkingsspectrum. Dit product en het gebruik hiervan valt onder één of meer van de volgende patenten. (patentnummers : EP1987121)

Werkzaam tegen een breed scala van bacteriën en virussen. Laat geen actieve residues achter dankzij een snelle verdamping.

Incidin OxyFoam & OxyWipe - kenmerken :

- ▲ Hi-speed H₂O₂™
- ▲ Voldoet aan EN16615 norm
- ▲ CE markering, klasse IIb
- ▲ Actief bestanddeel breekt af in water en zuurstof
- ▲ Uitstekende materiaalcompatibiliteit

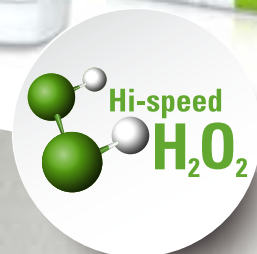

Incidin® OxyFoam & OxyWipe

Gebruiksklare reiniger en desinfectans met Hi-speed H₂O₂[™]

15 SEC¹
Bactericide
(EN 13727 / 16615)

15 SEC¹
Virucide werking tegen
omkapselde virussen

15 MIN¹
Noro virucide

| Kenmerken | Voordelen |
|--------------------|---|
| EFFECTIEF | Breed werkingsspectrum Korte inwerktijden |
| VEILIG | Actief bestanddeel breekt af in water en zuurstof Uitstekende materiaalcompatibiliteit |
| GEMAKKELIJK | Reiniging & desinfectie in één stap Gebruiksklaar |

MICROBIOLOGISCHE EN VIRULOGISCHE TESTRESULTATEN

| WERKZAAMHEID ONVERDUND | OxyFoam INWERKTUJD | OxyWipe INWERKTUJD |
|---|-----------------------|-----------------------------|
| Oppervlakken desinfectie volgens VAH methode 2015 (incl. EN 16615), vuile condities | | |
| Bactericide, gistdodend | 5 min | 15 min |
| Fungicide | 15 min | 15 min |
| Mycobactericide | 15 min | 60 min |
| Getest volgens RKI aanbeveling 01/2004* (vuile condities) | | |
| Actief tegen omkapselde virussen volgens RKI aanbeveling 01/2004* | 15 sec | 30 sec |
| Adeno* | 1 min | 15 min |
| Polyoma SV40* | 30 sec | 30 sec |
| Rota* | 30 sec | 30 sec |
| Europese normen (schone en vuile condities) | | |
| EN 13727 (bactericide) | 15 sec | 1 min |
| EN 13624 (gistdodend) | 1 min | 15 min |
| EN 13624 (fungicide) | 5 min | 15 min |
| EN 14348 (tuberculocide, mycobactericide) | 5 min | 30 min |
| EN 14476 Adeno | 30 sec | 1 min |
| EN 14476 Noro | 15 min | 60 min (vuile condities) |
| Europese normen (vuile condities) - 4 vlakken-test | | |
| EN 16615 (bactericide) | 15 sec | 5 min |
| EN 16615 (gistdodend) | 15 sec | 1 min |
| EN 16615 (fungicide) | 5 min | 5 min |
| EN 16615 (tuberculocide, mycobactericide) | 15 min | 60 min |

* DWV 2008

INCIDIN OXYFOAM GEBRUIKSAANWIJZING



- 1 Het product op een afstand van ca. 30 cm op het oppervlak sprayen
- 2 Reinig het oppervlak en zorg voor volledige bevochtiging van het oppervlak
- 3 Laat drogen



- 1 Het product aanbrengen op een schone doek (wipe)
- 2 Reinig het oppervlak en zorg voor volledige bevochtiging van het oppervlak
- 3 Laat drogen

EUROPEAN HEADQUARTERS
ECOLAB EUROPE GMBH
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
tel : +41(0)44 877 2001

MICROTEK MEDICAL B.V.
A DIVISION OF ECOLAB
Hekkehorst 24
7207 BN Zutphen
Nederland
tel : +31 575 599 200

ECOLAB SPRL
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België
tel : +32 (0)2 467 51 11

CE 0297

EFFECTIEF. VEILIG. GEMAKKELIJK.

TOEPASSINGSGEBIED

Incidin OxyFoam : Reiniging en desinfectie foamspray voor medische oppervlakken (inclusief bv. sondes) en inventaris.

Incidin OxyWipe : Reiniging en desinfectiedoekjes voor medische oppervlakken (inclusief bv. sondes) en inventaris.



GEBRUIKSAANWIJZING

Incidin OxyFoam : Het product op ca. 30 cm afstand op het oppervlak sprayen of aanbrengen op een schone doek (wipe).

Reinig het oppervlak en zorg voor volledige bevochtiging van het oppervlak vanwege de contacttijd.

Of gebruik het product onverdund op een schone doek, reinig het oppervlak en laat drogen.

Incidin OxyWipe : Neem één doekje. Bevochtig het oppervlak en zorg dat het oppervlak volledig bevochtigd wordt. Laten drogen en niet afspoelen. Sluit de verpakking na gebruik.

Niet geschikt voor einddesinfectie van invasieve medische hulpmiddelen.

Niet geschikt voor oppervlakken welke gevoelig zijn voor oxidatieve middelen zoals marmer, koper of messing.

SAMENSTELLING

100 g bevat:

Incidin OxyFoam: 1.5g waterstofperoxyde

Incidin OxyWipe: 1.0g waterstofperoxyde

VERPAKKING EN BESTEL-INFORMATIE

| PRODUCT | VERPAKKING | REF |
|-----------------|-----------------|---------|
| Incidin OxyFoam | 6 x 750ml | 3082180 |
| Incidin OxyWipe | 6 x 100 doekjes | 3082380 |

BEWAREN - OPSLAG

Het product moet worden bewaard in de originele verpakking beneden 25°C, op een koele, droge plaats buiten direct zonlicht.

Houdbaarheidsdatum na opening :

Incidin OxyFoam : tot eind vervaldatum

Incidin OxyWipe : 3 maanden

References :

1. Incidin OxyFoam (EN13727 / EN 16615 / EN 14476)

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.