


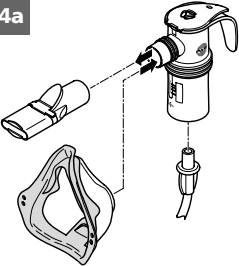
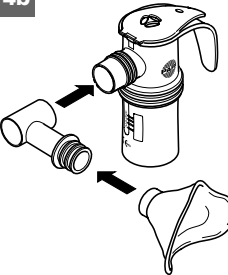
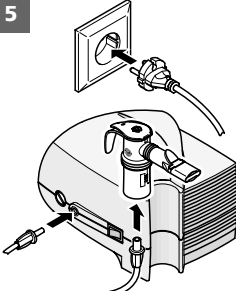
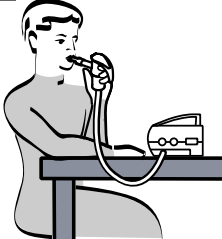

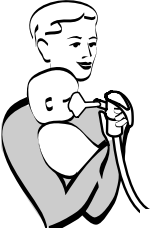
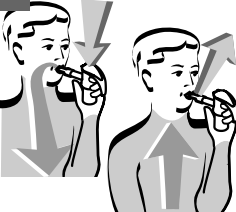
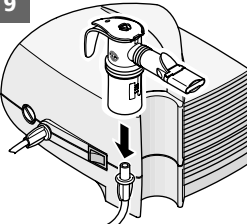
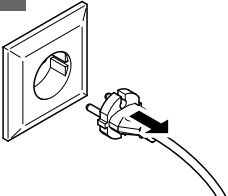


# L'inhalation avec le nébuliseur PARI LC® SPRINT SP


Référez-vous aux notices complètes fournies avec les compresseurs et nébuliseurs PARI si vous avez besoin d'informations complémentaires, prière de visiter notre website [www.pari.de](http://www.pari.de).

<p><b>1</b></p>  <p>Bien se laver les mains avant chaque séance.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Ouvrir le couvercle du nébuliseur en le faisant basculer vers l'avant.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Verser le(s) médicament(s) dans le nébuliseur (volume minimum = 2 ml / maximum = 8 ml). Refermer le couvercle.</p>	<p><b>4a</b></p>  <p>Raccorder l'embout buccal ou le masque au nébuliseur.</p>
<p><b>4b</b></p>  <p>En cas d'utilisation du masque pour nourrissons PARI BABY, emboîter le coude et l'orienter en fonction de la position du bébé.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Raccorder le nébuliseur au compresseur avec le tuyau d'air ; brancher la prise du compresseur ; appuyer sur l'interrupteur du compresseur.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>S'asseoir en se tenant droit mais rester détendu.</p>	<p><b>7a</b></p>  <p>Maintenir l'embout buccal entre les dents et serrer les lèvres autour pendant la séance.</p>
<p><b>7b</b></p>  <p>Maintenir le nébuliseur à la verticale. En cas d'usage du masque, le maintenir bien appuyé sur le nez et la bouche du patient en exerçant une légère pression.</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Inspirer calmement et profondément au travers de l'embout buccal ou du masque, puis expirer calmement. Un changement de bruit dans le nébuliseur (gargouillement) indique que la séance est terminée. Eteindre le compresseur.</p>	<p><b>9</b></p>  <p>Débrancher le nébuliseur du tuyau d'air ; jeter le volume résiduel de médicament. Si de la condensation (buée) s'est formée dans celui-ci, y envoyer de l'air pendant quelques minutes pour le sécher.</p>	<p><b>10</b></p>  <p>Pour déconnecter l'appareil complètement du secteur, débranchez la fiche secteur.</p>

## au domicile du patient

Référez-vous aux notices complètes fournies avec les compresseurs et nébuleuseurs PARI si vous avez besoin d'informations complémentaires, prière de visiter notre website [www.pari.de](http://www.pari.de).


1

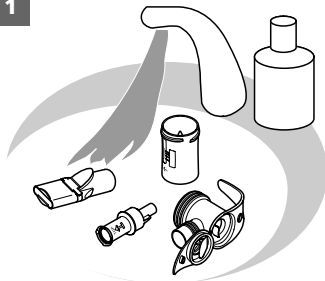

### Nettoyage (après chaque séance)

- Jeter le volume résiduel de médicament.
- Démontez le nébuleuseur complètement (4 pièces).
- Nettoyer toutes les pièces avec du détergent et de l'eau chaude.
- Rincer toutes les pièces sous l'eau courante.


2

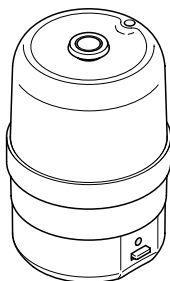

### Désinfection

- Utiliser le désinfecteur vapeur Petra (cycle de 15 minutes)
- Alternative :
- Placer le nébuleuseur démonté dans l'eau bouillante pendant 15 minutes.


3

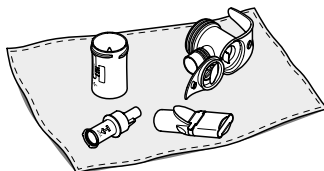

### Séchage

- Laisser sécher les pièces du nébuleuseur démonté sur une surface propre et sèche. Les pièces seront complètement sèches en environ 4 heures.


4

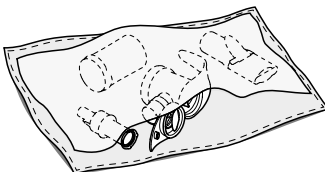

### Conservation / rangement

- Garder le nébuleuseur dans un tissu propre et non pelucheux dans un endroit sec.

5

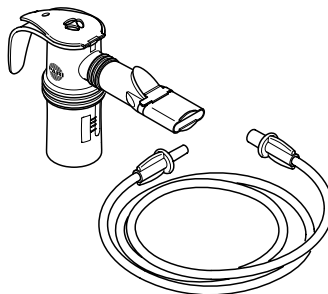

### Renouvellement

- Remplacez le nébuleuseur LC SPRINT SP au bout de SIX SEMAINES D'UTILISATION.

Spezialisten für effektive Inhalation



PARI GmbH

Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Germany  
Tel.: +49 (0)8151-279 0 • Fax: +49 (0)-8151-279 101

E-Mail: [info@pari.de](mailto:info@pari.de) • [www.pari.de](http://www.pari.de)