



## Korte gebruiksaanwijzing: inhaleren met de PARI LC SPRINT® SP vernevelaar


U dient in ieder geval de gebruiksaanwijzingen van de vernevelaar en de compressor te volgen. Daar vindt u een gedetailleerde beschrijving. Deze wordt bij het apparaat meegeleverd. Bij verlies kunt u de desbetreffende gebruiksaanwijzing opvragen op de website [www.pari.de](http://www.pari.de) of aanvragen via het telefoonnummer +49 (0)81 51-279 220.

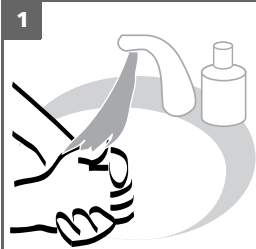


1  
U dient voor iedere inhalatie grondig uw handen te wassen.

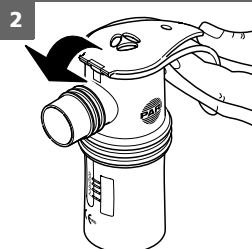


2  
Open het afsluitdeksel.

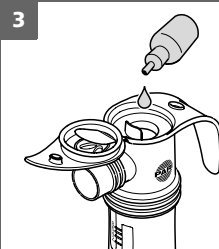


3  
Vul met inhalatieoplossing. Minimum = 2 ml/ maximum = 8 ml. Sluit het deksel.

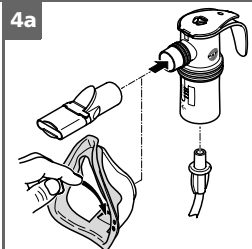


4a  
Monteer het mondstuk of masker.

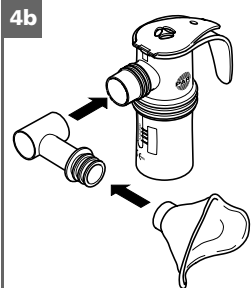

4b  
Als een babymasker wordt gebruikt, dient u een hoekstuk te gebruiken en het masker te positioneren overeenkomstig de houding van de baby.

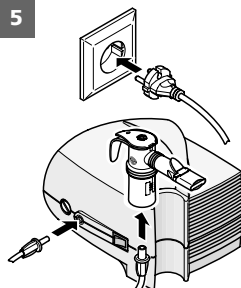


5  
Monteer de luchtslang en de compressor en zet deze aan.

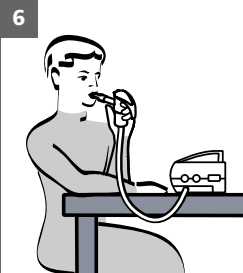


6  
Ga rechtop en ontspannen zitten.




7a  
Klem het mondstuk tussen de tanden en omsluit het met de lippen.

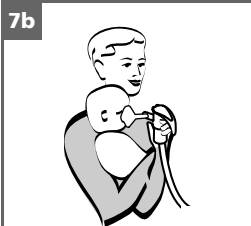


7b  
Houd de vernevelaar rechtop. Het masker moet hermetisch aansluiten.

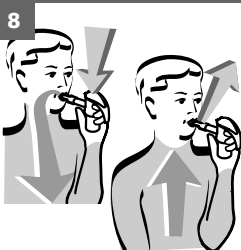

8  
Adem langzaam en diep door het mondstuk resp. het masker in en adem na een korte pauze langzaam en volledig uit. Als het geluid van de vernevelaar verandert, wijst dit erop dat het medicament op is.

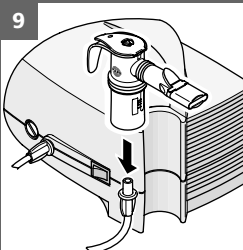

9  
Verwijder de vernevelaar, laat de luchtslang nog even droogblazen en zet dan pas het apparaat (de knop) af.

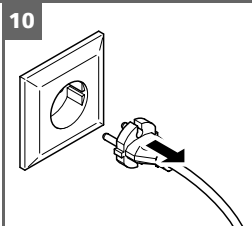




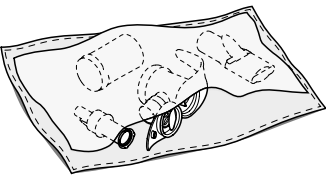
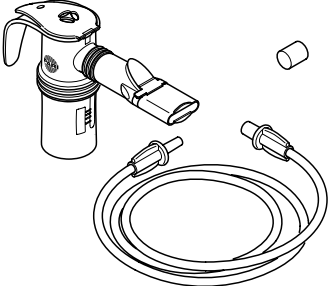
10  
Voor een volledige scheiding van het stroomnet moet u het netsnoer eruit uittrekken.

# Korte gebruiksaanwijzing: hygiëne en onderhoud

## van de PARI LC SPRINT® SP vernevelaar - voor thuis

U dient in ieder geval de gebruiksaanwijzingen van de vernevelaar en de compressor te volgen. Daar vindt u een gedetailleerde beschrijving. Deze wordt bij het apparaat meegeleverd. Bij verlies kunt u de desbetreffende gebruiksaanwijzing opvragen op de website [www.pari.de](http://www.pari.de) of aanvragen via het telefoonnummer +49 (0)81 51-279 220.

Na ieder gebruik dient u het volgende te doen:
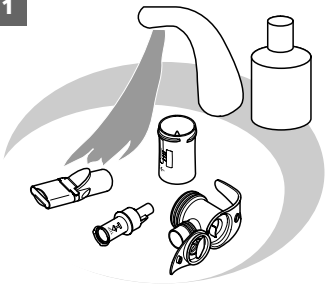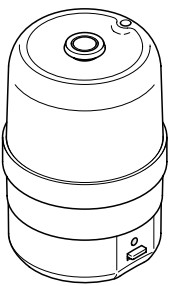
<p><b>1</b></p>  <p><b>Reiniging</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vernevelaar demonteren.</li><li>• Met warm leidingwater en wat afwasmiddel reinigen.</li><li>• Onderdelen grondig onder stromend water naspoelen.</li></ul>	<p><b>2</b></p>  <p><b>Desinfectie</b></p> <p>Aanbevolen methode:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vaporisator Petra DI 6.00</li></ul> <p>Alternatieve methode:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Desinfectie in een voldoende hoeveelheid kokend water (15 min.)</li></ul>	<p><b>3</b></p>  <p><b>Drogen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Onderdelen op een droge, pluisvrije doek leggen.</li></ul>
<p><b>4</b></p>  <p><b>Opbergen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De onderdelen op een droge, stofvrije plaats bewaren.</li></ul>	<p><b>5</b></p>  <p><b>Vervanging</b></p> <p>De vernevelaar dient na max 6 weken te worden vervangen.</p>	

Spezialisten für effektive Inhalation



PARI GmbH

Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Germany

Tel.: +49 (0)8151-279 0 • Fax: +49 (0)-8151-279 101

E-Mail: [info@pari.de](mailto:info@pari.de) • [www.pari.de](http://www.pari.de)