



# Sekumatic® FDR


VLOEIBAAR REINIGINGS- EN  
DESINFECTIEMIDDEL

- ▲ Veilige desinfectie
- ▲ Uitstekende reinigingsresultaten
- ▲ Bijzonder materiaalvriendelijk



## Sekumatic® FDR

Vloeibaar reinigings- en desinfectiemiddel

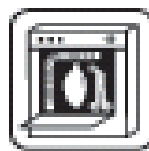

CE

### TOEPASSING

Voor desinfectie en reiniging in instrumentenwasmachines welke gebruik maken van een chemisch/thermisch proces, bv. : reinigings- en desinfectie-apparaten, bed- en container wasmachines, bedpanspoelers. Sekumatic FDR werd getest volgens de voorschriften van het AK-BWA. . Sekumatic FDR kan ook gebruikt worden voor chemisch/thermische reiniging in andere sectoren.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Dosering bij gebruik in instrumentenwasmachines in medische omgeving : 5 – 10 ml / L bij 60°C, inwerktijd : 5 min. Gelieve de voorschriften te volgen van de machinefabrikanten.

Dosering bij gebruik in bed- en containerwasmachines : 5 – 10 ml/L bij 60°C, inwerktijd : 90 – 120 sec.

Ter ondersteuning van het droogproces kunnen wij u Sekumatic FKN aanbevelen.

### SAMENSTELLING

Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, alcoholische oplosmiddelen, complexeermiddelen, corrosie-inhibitoren

Actieve werkstoffen per 100 g :  
2 g Glucoprotamine, 2 g Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alpha [2-(didecylmethyl-am-monio)ethyl]-Omega-hydroxy-propanoat (zout), 0,75 g Benzalkoniumchloride

### VERPAKKING / REFERENTIE

Verp. : 3 x 5 L - Ref. : 3078110  
Verp. : 1 x 20 L - Ref. : 3078130  
Verp. : 1 x 200 L - Ref. : 3078100

#### Eigenschappen

Aldehydenvrij, op basis van de gepatenteerde werkstof Glucoprotamine

Zonder tensiden, pH neutraal

Optimale formulering

#### Voordelen

Veilige desinfectie bij 60°C, gebruiksvriendelijke formule zonder aldehyden

Schuimarm, zeer materiaalvriendelijk, sterke reiniger

Voldoet aan de voorschriften van het "AK-BWA"

#### Chemische gegevens

Dichtheid :	20°C	1,03 g/ml
pH-waarde (onverdund)	20°C	Ca. 5,5
pH-waarde (verdund, 5-10 ml/L in RO water)	20°C	6 - 8

### INFORMATIE

Wetenschappelijk dossier en MSDS-fiche zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Producten



Service



Garantie

