

# La performance a un nouveau style

## Philips Respironics Wisp – masque nasal de contact minimum

Notice de mise en place du masque



1

Avant de mettre en place le masque, enlevez les clips de fixation du harnais en les faisant pivoter.

**Important :** utilisez le gabarit pour sélectionner la taille de coussin qui convient le mieux en fonction de la largeur du nez, sans bloquer les narines.



2

Maintenez délicatement le coussin du masque sur votre nez et tirez le harnais au-dessus de votre tête.

**Remarque :** le harnais doit reposer à plat sur l'arrière de la tête.



3

Maintenez le masque en place et remplacez les clips de fixation.

**Remarque :** si vous ne voulez pas utiliser les clips, vous pouvez glisser les languettes du harnais dans les fentes de fixation du masque.



4

Tirez sur les languettes du harnais pour un ajustement équilibré des sangles en bas et en haut du harnais. Le masque doit être posé confortablement sur le visage.

**Important :** ne serrez pas trop le harnais, il doit être lâche et permettre un port confortable.



5

Vous pouvez aussi glisser le tube du masque dans la boucle supérieure du harnais avant de relier le tube de la machine Philips Respironics.

**Remarque :** l'utilisation de cette boucle du harnais peut apporter un confort supplémentaire à certaines positions de sommeil.




6

Prenez différentes positions de sommeil et bougez jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Si les fuites d'air sont excessives, faites quelques réglages dans la position couchée.

**Remarque :** il est normal de constater une légère fuite d'air. Ajustez les sangles supérieures du harnais afin de réduire les fuites autour des yeux.


# La performance a un nouveau style

Philips Respironics Wisp – masque nasal de contact minimum

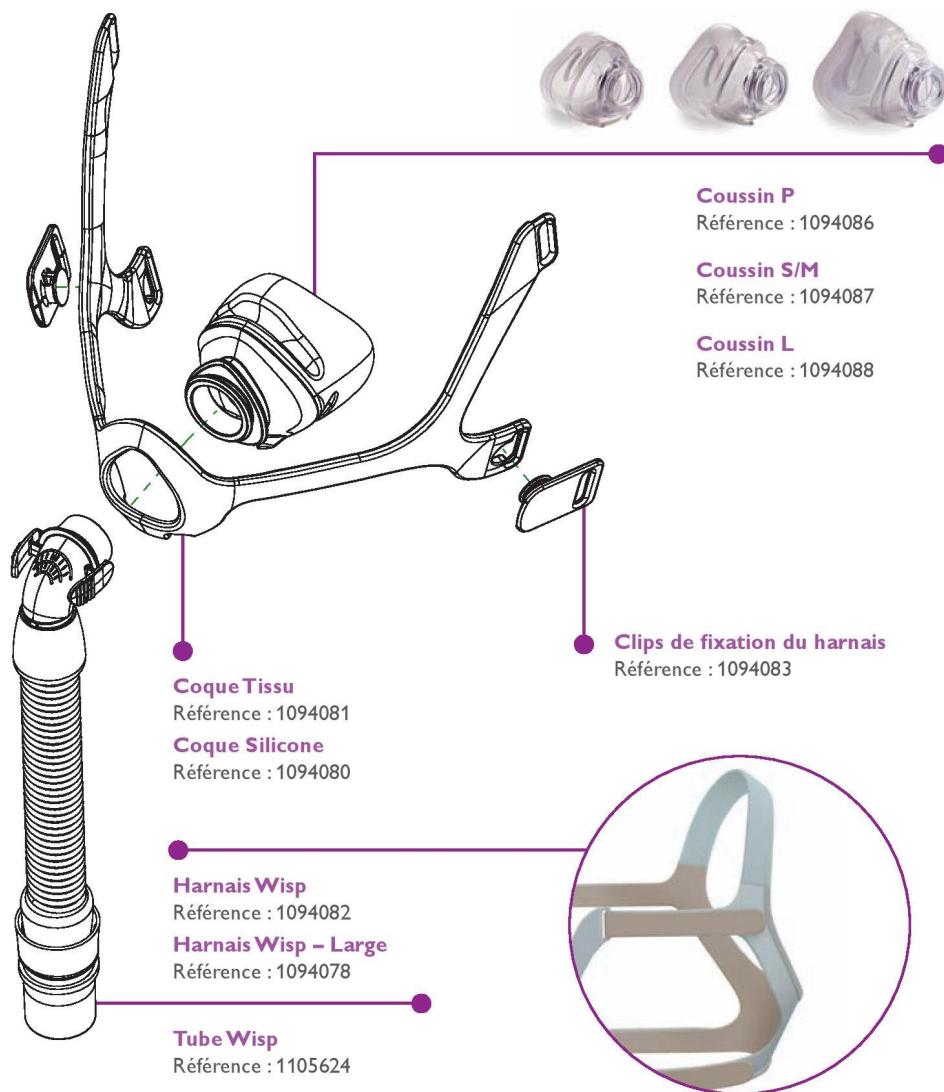

## Innovation

La technologie Auto-Seal du masque Wisp a été élaborée pour permettre une meilleure stabilité du masque et une étanchéité haute performance.

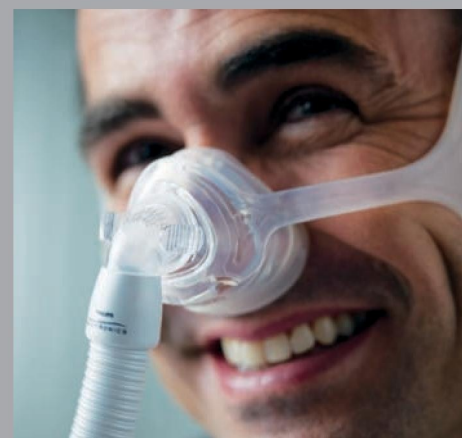

## Références

Désignation	Tailles	Références
<b>Masque nasal Wisp avec dispositif de fuite</b>		
Masque Wisp coque Silicone	3 tailles de coussins	1094060
Masque Wisp coque Tissu	3 tailles de coussins	1094061
<b>Masque nasal Wisp sans dispositif de fuite</b>		
Masque Wisp SE coque Silicone	3 tailles de coussins	1094062



© 2009 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Philips Healthcare se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et/ou d'arrêter la production de tout produit à tout moment et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenue pour responsable des conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

ATTENTION : Conformément à la législation fédérale des États-Unis, ces dispositifs ne peuvent être vendus que par un médecin ou sur prescription médicale.

Philips Healthcare fait partie de Royal Philips Electronics

Respironics Europe, Moyen-Orient, Afrique  
+33 1 47 52 30 00

Respironics France

+33 2 51 89 36 00

Respironics Suisse

+41 6 27 47 17 50

Philips Respironics

1010 Murry Ridge Lane

Murrysville, PA 15668

Service Client

+1 724 387 4000

800 345 6443 (toll free, US only)

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)