



nv HENROTECH sa

T : 03 / 844.53.33

F : 03 / 844.52.13

e : [respircenter@henrotech.be](mailto:respircenter@henrotech.be)

http : [www.henrotech.be](http://www.henrotech.be)

# " BLUE MASK R "

## Masque de Réanimation

### " BLUE MASK R "

Votre indispensable protection  
en cas de premiers soins  
en cas d'accident ou pour la  
réanimation bouche à bouche



Le set "BLUE MASK<sup>R</sup>" se compose du masque , une soupape et un embout permettant une réanimation bouche à bouche sans risques !

L'utilisation correcte du " BLUE MASK R " permet au sauveteur de se protéger contre le contact de la bouche et de l'air expiré de la victime . Le risque de transmission de maladies contagieuses telles que le Sida , l'Hépatite , la Tuberculose , ... , est ainsi minimalisé ("cross-over infections") .

La soupape spéciale du " BLUE MASK R " permet la circulation libre de l'air fort oxygéné du sauveteur en direction de la victime , tandis que l'air expiré par la victime s'échappe par une sortie latérale de la soupape , garantissant ainsi une hygiène et une efficacité maximale .

Le masque transparent permet au sauveteur de remarquer immédiatement toute matière vomie par la victime durant la réanimation .

Le " BLUE MASK R " est immédiatement utilisable en cas de nécessité . Il est très léger et suffisamment compact pour trouver sa place dans la trousse de premiers soins , la boîte à gants de la voiture , une sacoche ou une trousse de secours . Son bas prix permet le stockage de " BLUE MASK R " en divers endroits afin d'offrir un maximum de sécurité et de protection .

#### Caractéristiques :

\*léger et compact

\*efficacité et hygiène maximales

\*bas prix d'achat

\*simplicité d'utilisation


#### TRES IMPORTANT !

1. Commencez la réanimation dès que la victime ne respire plus d'elle-même !
2. Libérez les voies respiratoires !
3. Soulevez la tête vers l'arrière afin de libérer les voies respiratoires !
4. Suivez la procédure de réanimation bouche à bouche des premiers secours!

" BLUE MASK " ...en cas de besoin, il est indispensable !!



position **incorrecte**  
fig A

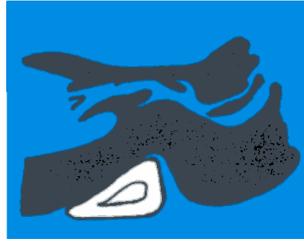

position **correcte**  
fig B



position **Blue Mask correcte**  
fig C

## Mode d'emploi :

- 1 . Tournez la tête de la victime sur le côté , et libérez la bouche et l'espace pharyngial .
- 2 . Placez la victime sur le dos , face vers le haut .
- 3 . Basculez sa tête vers l'arrière et soulevez son menton vers le haut, afin de libérer ses voies respiratoires.
- 4 . Placez sous les épaules de la victime un essuie-mains ou drap enroulé, ou un coussin , ou votre main , afin d'obtenir une ouverture maximale de ses voies respiratoires .
- 5 . Placez le masque à soupape **Blue Mask** muni de son embout (voir fig C ) sur la bouche et le nez de la victime et commencez immédiatement la respiration artificielle , en soufflant deux fois dans l'embout durant 1 à 1,5 secondes par fois.
- 6 . Ensuite vous soufflez dans l'embout avec une fréquence de 10 à 15 fois par minute .
- 7 . Ceci devrait gonfler les poumons de la victime , avec comme conséquence l'ouverture de sa cage thoracique , et la victime peut expirer par la soupape latérale du **Blue Mask** .

Henrotech sa et le fabricant ne sont pas responsables pour un mauvais fonctionnement ni pour les dommages résultants d'altérations , mauvais traitement , mauvais stockage ou stockage en de mauvaises conditions , ou de la mauvaise utilisation du **Blue Mask** par des personnes non ou mal formées à la réanimation .

Pour tous renseignements contactez :

**nv HENROTECH sa**  
**Soins Respiratoires**

Acacialaan,8,  
B - 2630 – Aartselaar

T: +32/3/844.53.33

**RESPIRATORY MEDICAL EQUIPMENT**

<http://www.henrotech.be>  
e : [respircenter@henrotech.be](mailto:respircenter@henrotech.be)

F: +32/3/844.52.13