



# Sekusept<sup>®</sup> Easy Combi Pack


VLOEIBAAR HIGH LEVEL DESINFECTIE-  
MIDDEL VOOR INSTRUMENTARIUM

- ▲ Maximale reiniging
- ▲ Veilig voor materialen
- ▲ Volledig spectrum



## Sekusept® Easy Combi Pack

### VLOEIBAAR HIGH LEVEL DESINFECTIE- MIDDEL VOOR INSTRUMENTARIUM

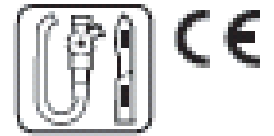

#### Eigenschappen

#### Voordelen

Volledig spectrum	Bactericide, sporicide, gistdodend, virucide
Doeltreffende desinfectie	Maximale reiniging/desinfectie, ook bij sterk vervuilde instrumenten, korte inwerktijd
Goede compatibiliteit	Veilig voor materialen
Gebruiksvriendelijk	Teststrookjes ter controle van de oplossing

#### TOEPASSING

Voor de desinfectie na reiniging van medisch instrumentarium zoals flexibele endoscopen, instrumenten uit chroom-nikkel en rubber/plastic toebehoren voor anesthesie, urologie en chirurgie.

NIET geschikt voor medisch instrumentarium vervaardigd uit messing of koper of reeds beschadigde instrumenten of endoscopen.

#### GEBRUIKSAANWIJZING

##### Aanmaken van een 10 L oplossing :

Voeg 1 flacon Sekusept Easy toe aan 6 L water.  
Voeg vervolgens 1 flacon Sekusept Activator toe aan de oplossing en roer om.  
Vul bij met water (max. 30°C) tot een totale hoeveelheid van 10 L.  
Uw oplossing is klaar voor gebruik.  
De instrumenten onderdompelen in de oplossing en na 15 min. de instrumenten uit de oplossing nemen en met water (minstens drinkwaterkwaliteit) afspoelen.

De oplossing dagelijks verversen.

#### INFORMATIE

Wetenschappelijk dossier en MSDS-fiche zijn verkrijgbaar op aanvraag.

#### SAMENSTELLING

##### Sekusept Easy :

Waterstofperoxide, perazijnzuur, organische zuren en neutralisator

##### Sekusept Activator : Alkali, fosfaten

#### VERPAKKING / REFERENTIE

##### **Sekusept Easy Combi Pack** bestaande uit :

##### **10 L oplossing – ref. : 3020470**

Sekusept Easy - Verp. : 4 x 450 ml  
Sekusept Activator - Verp. : 4 x 420 ml

##### **5 L oplossing – ref. : 3028780**

Sekusept Easy - Verp. : 6 x 225 ml  
Sekusept Activator - Verp. : 6 x 210 ml

##### **Teststrookjes voor Sekusept Easy :**

Verp. : 4 x 50 stuks – ref. : 3007370

Producten



Toebehoren



Service




Garantie



Ecolab BVBA/SPRL  
Noordkustlaan 16 C - 1702 Groot-Bijgaarden  
Tel: 32 2/467.51.11 Noodnummer: 32 13/67.06.70  
Customer Service België : emailadres : order.be@ecolab.com

# Sekusept® Easy Combi Pack

VLOEIBAAR HIGH LEVEL DESINFECTIE-  
MIDDEL VOOR INSTRUMENTARIUM

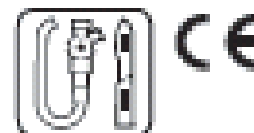

Werkingspectrum	Inwerktijd
Bactericide - EN 1040	5 min
Bactericide (schone omstandigheden) – EN 13727	1 min
Fungicide (gisten) – EN 1275	5 min
Virucide – EN 14476	15 min
M terrae (schone omstandigheden) – EN 14348	5 min
Sporicide (schone omstandigheden) – EN draft CEN/TC216/WG1 N176	15 min

Producten



Toebehoren



Service



Garantie



Ecolab BVBA/SPRL  
Noordkustlaan 16 C - 1702 Groot-Bijgaarden  
Tel: 32 2/467.51.11 Noodnummer: 32 13/67.06.70  
Customer Service België : emailadres : order.be@ecolab.com