



nv HENROTECH sa

T : 03 / 844.53.33

F : 03 / 844.52.13

e : [respircenter@henrotech.be](mailto:respircenter@henrotech.be)

http : [www.henrotech.be](http://www.henrotech.be)

# Spiro-Ball

“glimlachend gezicht” incentive trainer voor de longen



## Spiro-Ball - “glimlachend gezicht” incentive trainer voor de longen

de volumetrische trainer **SpiroBall** is een incentive trainer voor de longen, die de patient aanmoedigt het gebruik ervan vol te houden en om zelf de verbetering van zijn pulmonaire capaciteit te controleren.

## Verzekert de S.S.M.I.

**Spiro-Ball** is ontworpen om een trage aangehouden en continue inademing te verzekeren, om het objectief van een werkelijk diepe inademing te bereiken.

S.S.M.I. : Slow Sustained Maximal Inspiration

## Volume gerichte toestel

**Spiro-Ball** geeft het ingeademde luchtvolume aan, en kan gebruikt worden om het verschil te meten tussen het ingeademd luchtvolume pré- en postoperatief.

## Gemak van gebruik voor patient en medisch personeel

**Spiro-Ball** is een lichtgewicht apparaat, gemakkelijk te gebruiken en die de patient aanmoedigt om de inademing vol te houden tot het gewenste luchtvolume bereikt is.

## Gebruik:

**SpiroBall** is te gebruiken in alle gevallen waar de patient, omwille van fysiologische, chirurgicale of psychologische omstandigheden, de vereiste luchthoeveelheid niet inademt. Deze conditie, indien zò gelaten, kan leiden tot atelectasis of een partiele longcollaps.

## Technische Kenmerken

- dubbele schaal aanduiding (patient/therapeut en geneesheer) tot 4.000 ml om de 250 ml.
- compact en ergonomische ontwerp
- zijdelijke indicatie van het voorgeschreven volume
- zijdelijke kiemvrije stockage van het mondstuk
- dubbele filtratie stof en deeltjes, een op het mondstuk en een op het lichaam van het toestel.
- uittrekbare buis
- « glimlachend gezicht » indicator : gedurende de oefening moet de gele bal tussen de twee gezichten blijven staan

**belangrijk** : de frekwentie van gebruik en het in te ademen luchtvolume moet voorgeschreven of vastgelegd worden door een therapeut of dokter