

" YELLOW mask "

masque de réanimation jetable

vosre protection simple et compacte !
pour premiers secours en cas d'accident
et pour réanimation bouche à bouche



Le " YELLOW mask " se compose d'une feuille protectrice (anglais : shield) à double embout : du côté de la victime avec embout ovale , et du côté du sauveteur un embout avec filtre pour une réanimation bouche à bouche sans risque !

Utilisé correctement, le " YELLOW mask R " assurera la protection du sauveteur lors du contact buccal et de la victime contre l'air expiré. De cette façon on minimise le risque de maladies comme l' HIV, hépatite, tuberculose,... par contamination "croisée".

embout sauveteur (avec filtre)

embout victime

ziide slachtoffer



C'est un " masque de sauvetage à utilisation unique " jetable !

Le " YELLOW mask " est à utiliser immédiatement en cas de besoin. Il est suffisamment léger et compact pour pouvoir être disposé dans un coffret de premiers secours, dans le compartiment à gants de la voiture, un sac de dames ou un sac de premiers secours. Son prix très bas permet le stockage du " YELLOW mask " dans un nombre d'endroits, afin d'offrir un maximum de sécurité et de protection.

Caractéristiques :

Léger et compact
Prix fort bas

Efficacité et hygiène maximale
Utilisation simple

FORT IMPORTANT !

1. Démarrez la réanimation dès que la victime ne respire plus spontanément !
2. Libérez les voies respiratoires !
3. Inclinez la tête vers l'arrière pour libérez les voies respiratoires !
4. Suivez la procédure générale pour la réanimation bouche à bouche !

" YELLOW mask " ... En cas de besoin, il est indispensable !!

Pour tous renseignements, contactez :

HENROTECH RESPIRATORY CARE sa

Acacialaan,8,
B - 2630 – Aartselaar

T: +32/3/844.53.33


respircenter@henrotech.be

www.henrotech.be

F: +32/3/844.52.13



position **incorrecte**
fig A

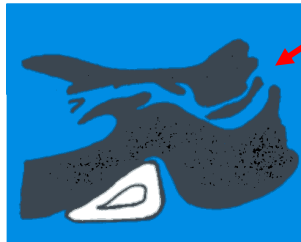

position **correcte**
fig B

position **correcte "YELLOW mask"**

voir fig 2 : placez
l'embout ovale **DANS** la
bouche du patient

mode d'emploi :

1. Assurez vous d'abord qu'il est prudent de s'approcher de la victime.
2. S'il n'y pas de mouvement ou de bruit respiratoire ,placez la victime sur le dos.
3. Inclinez la tête de la victime vers l'arrière et bougez la machoire vers l'avant.
(voir fig A)
4. Libérez les voies respiratoires de toute obstruction et maintenez les libres.
5. Désagrafez les vêtements autour du cou.
6. Déroulez l'écran plastique qui entoure l'embout et placez le coté ovale du Yellow Mask dans la bouche de la victime. (voir fig B) .
7. Au travers de l'écran plastique,pincez les narines tandis que de l'autre main vous soutenez la machoire. (voir fig C)

mode d'emploi :

1. Assurez-vous d'abord qu'il est prudent d'approcher la victime .
2. Indien er geen ademhalingsbeweging of -geluiden zijn , plaats het slachtoffer op de rug .
3. Hef het hoofd van het slachtoffer naar achter en beweeg de kaak naar voor .
Zie fig A .
4. Maak de luchtweg vrij van elke obstructie en houd ze vrij .
5. Maak de kleding los rond de nek .
6. Ontrol het plastieken scherm dat het mondstuk omgeeft en plaats de ovale kant van de Yellow Mask in de mond van het slachtoffer .Zie fig B.
7. Hou met de ene hand door het scherm heen , de neusgaten dicht , terwijl je met de andere hand de kaak ondersteunt .Zie fig C.
8. Maak een goede afsluiting rond het plastieken scherm en druk het tegen het gezicht . Begin de mond aan mond beademing zoals vereist . Zie fig D.
Controleer dat mond en luchtweg vrij zijn van overgeefsel of andere fluida .
- AANDACHT : niet teveel blazen , speciale aandacht voor kinderen en babies !!**
9. Houd de beademing vol tot de medische hulpdiensten aankomen of tot de ademhaling herneemt wanneer het slachtoffer voorzichtig in de recovery positie geplaatst wordt !
10. Verwijder de Yellow Mask onmiddellijk na gebruik en vermijd elk rechtstreeks contact met de slachtofferzijde van het scherm . Wegwerpen met gebruik van de originele verpakking .

Nota : deze instructies zijn enkel een richtlijn en geen substituut voor degelijke reddingstraining !

Henrotech nv noch de fabrikant zijn verantwoordelijk voor een slechte werking of schade resulterend van alteraties , mishandeling , slecht bewaren of stokage onder slechte omgevingsomstandigheden , of verkeerd gebruik van de Yellow Mask door personen slecht getraind in reanimatie .